



# Perfecta® REV!™

Blanqueador dental profesional

**Sólo 15 minutos, una vez al día, ¡para la sonrisa más blanca de sus pacientes!**

**REV! tiene un 1/4 de tiempo de uso más corto que las tiras más populares!<sup>1,2</sup>**

- Menor sensibilidad** - 66% menos sensibilidad que las tiras más populares.<sup>1,2</sup>
- Blanqueado superior** - Tecnología patentada con resultados comprobados!
- REV! Enjuague** - Resalta la blancura. Elimina la gel residual. Refresca con agradable sabor a menta.

**Una revolución de Premier en blanqueadores dentales.**

Para mantener los dientes más blancos, se incluye la pasta dental de baja abrasión ARM & HAMMER® ADVANCE WHITE® con cada Paquete de REV! para el paciente



Paquete para el paciente (en la imagen) - Tratamiento completo de dos semanas.  
Paquete Refresher™ - Ideal para retoques.

# NUEVA Perfecta® REV!™

Sólo 15 minutos, una vez al día, ¡para la sonrisa más blanca de sus pacientes!



## El tratamiento blanqueador Perfecta® REV!™ es un proceso revolucionario.

**REV! Paso 1 Gel** - Esta fórmula patentada con 14% de peróxido de hidrógeno proporciona resultados blanqueadores comprobados<sup>1</sup> con el menor tiempo de uso de todos los productos blanqueadores profesionales. REV! gel es de base acuosa, para hidratar los dientes mientras los blanquea, evitando de manera natural la sensibilidad al calor. Debido a una mayor concentración de peróxido de hidrógeno, la cantidad necesaria de gel es mucho menor que la de otros productos blanqueadores. *Sólo una pequeña perla de gel (vea la imagen a continuación)* se coloca en cada impresión dental de la bandeja. Es importante demostrar esto de manera adecuada al paciente en el consultorio.



**Consejo de tratamiento:** Comience los tratamientos blanqueadores 24-48 horas después de la limpieza, para permitir que se vuelva a formar la capa de película protectora sobre el esmalte.

**REV! Paso 2 Enjuague** - Este refrescante enjuague bucal está formulado para ser usado inmediatamente después de la gel REV!. Apenas se retiran las bandejas blanqueadoras, se hacen buches con el último enjuague REV! pasando por los dientes durante 20 segundos, y luego se expulsa.

### REV! Enjuague

- La fórmula especialmente amortiguada, acelera de inmediato la separación de la gel en sus componentes activos, proporcionando un refuerzo adicional al efecto blanqueador final.
- El último enjuague elimina de manera efectiva la gel residual de los dientes y cualquier tejido blando.
- Contiene una forma avanzada de vitamina C altamente estable, que se sabe que protege el tejido blando de todos los radicales libres que se encuentran, y además promueve dientes y encías sanos.
- Contiene trifosfato de pentasodio, un ingrediente inhibidor que ayuda a "levantar y eliminar" las manchas del esmalte.
- Sin alcohol y con sabor a menta refrescante, que deja la boca limpia y fresca después de cada tratamiento.

### Generador de consultas

REV! es la alternativa profesional a los blanqueadores de venta libre y en "tiras", y tiene un precio que lo ayudará a maximizar sus ganancias. El uso de bandejas administradas a la medida permite un incremento en la producción total. Ud. asegura que sus pacientes reciban un tratamiento cosmético monitoreado, comprobado y seguro.

REV! ¡Los paquetes refrescantes son ideales para todos sus pacientes que ya se han hecho el blanqueado y requieren un retoque!



Paquete para el paciente

¡Sólo 15 minutos, una vez al día!

### REV! Paquetes para seis pacientes 4000142

*Cada paquete para el paciente contiene suficiente material para dos semanas de tratamiento:*

Contiene: dos jeringas de 3cc de gel blanqueador patentado REV!, dos puntas dosificadoras para garantizar una adecuada carga de la bandeja, una botella de 4-oz de último enjuague REV!, una Guía para el paciente e Instrucciones para el odontólogo. Como bonificación, un tubo gratis de pasta dental ARM & HAMMER® ADVANCE WHITE® - *Lo único que necesita agregar son las bandejas a la medida y una caja de bandejas.*

### REV! Seis paquetes refrescantes 4000141

*Ideal para retoques y para evitar reacciones después del blanqueado en el consultorio:*

Contiene: una jeringa de 3cc de gel blanqueadora REV! patentada, una punta dosificadora para garantizar una adecuada carga de la bandeja, una botella de 4-oz de último enjuague REV!, último enjuague y una Guía para el paciente.




Paquete refrescante



Premier Dental Products Co.

1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, USA • Teléfono 888-670-6100 • 610-239-6000 • Fax 610-239-6171  
www.premusa.com • Correo electrónico: intlnfo@premusa.com

1. Clinical Evaluation of Bleaching Efficacy of Two Different Systems, Sheila Koh, D.D.S., F.A.G.D. University of Texas Health Science Center at Houston - Dental Branch, December 2004. 2. Crest® Whitestrips® Supreme / Crest and Whitestrips are not trademarks of Premier Dental™ / ARM & HAMMER and ADVANCE WHITE are registered Trademarks of Church & Dwight Company.

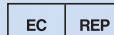

MDSS GmbH • Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Alemania

