

## SURGISPON

- Es una esponja hemostática COLOIDAL que puede absorber hasta 30 veces su peso. Sus indicaciones de uso son principalmente es en extracciones y en cirugías de hueso oral y tejido oral.
- Presentación en caja de 32 unidades estériles.
- **PRECIO DE INTRODUCCION Q120.00**

Como utilizar Surgispon:

1. Empapar el cubo en una solución salina estéril o utilizar seca.
2. Si se utiliza seca, la esponja se comprime levemente. Las esponjas deben de aplicarse al área del sangrado con poca presión por 1 o 2 minutos hasta que el sangrado pare.
3. Si se utiliza mojada, retirar el cubo de Surgispon y exprimirla con los dedos (utilizar guantes) para retirar burbujas de aire. Colocar el Surgispon en solución salina estéril y reposar ahí hasta que sea necesario.
4. Cuando el sangrado se controle, los cubos de Surgispon pueden ser dejados en el alveolo.

